

Collier cervical C2

INDICATIONS :

- Torticolis
- Entorse cervicale bénigne
- Sevrage progressif après port d'un collier rigide
- Crise aiguë de cervicarthrose
- Névralgies cervico-brachiales.

PROPRIÉTÉS :

Collier cervical non réglable en hauteur pour soutien moyen. La mousse de polyester et le renfort de rigidité permettent un maintien prolongé en hyper-extension et un effet antalgique. Le collier, présenté en 3 tailles et 3 hauteurs, assure une parfaite adaptation et un excellent maintien du rachis cervical. Fermeture du collier par système auto-agrippant. Renfort de rigidité amovible.

PRÉSENTATION :

Taille Tour de cou*	T1 De 28 à 33 cm	T2 De 34 à 39 cm	T3 40 cm et plus
Haut de Collier 7,5 cm - ACL	788 091 1	788 098 4	788 102 1
Haut de Collier 8,5 cm - ACL	788 099 0	788 097 8	789 119 5
Haut de Collier 9,5 cm - ACL	788 101 5	788 095 5	788 100 9

*Circonférence du cou à mi-hauteur.

Le collier cervical C2 Marque Verte est présenté en couleur bleu marine. Une housse de protection beige et lavable est comprise dans chaque boîte.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - CONTRE INDICATIONS :

Traumatisme cervical grave. En cas de port prolongé ou d'inconfort, suivre les conseils médicaux.

ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Sécher à plat sans repasser. Ne pas exposer au séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). Stockage à température ambiante à l'abri de la chaleur. Ne pas utiliser de détachant. Ne pas mettre en contact direct avec de la pommade.

Remboursement tarif Sécurité Sociale
Conforme LPPR





Collier cervical C2

MODE D'EMPLOI :

Mesurer le tour de cou (à mi-hauteur) et la hauteur pour déterminer la taille.

- 1 Ouvrir le collier, positionner le menton au niveau de la découpe anatomique.
- 2 Ajuster la fermeture auto-agrippante en fonction du tour du cou.
- 3 Une fois le collier bien ajusté, aucun mouvement de rotation, ni de flexion ne doit être possible.

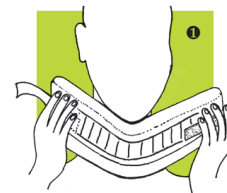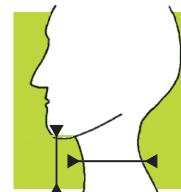

Pour tous conseils,
consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Marque Verte - Vente exclusive en pharmacie
Semes S.A. - B.P. 103 - 54183 HEILLECOURT

