

## Ceinture de soutien lombaire renforcée à rappel postural croisé

### INDICATIONS :

- Lomalgie
- Lumbago
- Douleurs musculaires
- Reprise d'activités
- Maintien après immobilisation

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas mettre la ceinture sur une peau lésée.

### PROPRIÉTÉS :

La ceinture de soutien lombaire flexi **CAST**<sup>o</sup> de Marque Verte est fabriquée dans un tissu élastique, aéré, résistant et souple. La conception par bande croisée permet d'épouser au mieux l'anatomie musculaire. La doublure intérieure "velours" des baleines, assure un grand confort.

- Le renfort lombaire est assuré par 4 baleines lombaires cambrées.
- **Le dispositif de serrage latéral permet de renforcer le niveau de contention dorsale.**
- Le renfort abdominal est assuré par 2 baleines souples.
- La fermeture auto-agrippante permet le réglage de la ceinture.

### PRÉSENTATION :

Hauteur	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Taille	T1	T2	T3	T4	T5
Tour de taille	Inférieur à 85 cm	De 85 à 95 cm	De 95 à 105 cm	De 105 à 120 cm	De 120 à 140 cm
Code ACL blanc	781 574 5	781 575 1	781 576 8	781 577 4	430 899 9
Code ACL noir	781 578 0	781 579 7	781 580 5	781 581 1	430 898 2

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne mettez jamais votre ceinture en contact avec une pomade ou un détachant. Ne l'exposez jamais près d'une source de chaleur ou aux rayons solaires.

### ENTRETIEN :

Laver la ceinture à l'eau douce (30°C) à la main avec un savon très pur. Ne pas employer de lessive contenant des détergents puissants. Rincer à l'eau douce. Laisser égoutter et sécher à plat.


Remboursé Sécurité Sociale  
Conforme LPPR



## Ceinture de soutien lombaire renforcée à rappel postural croisé

### MODE D'EMPLOI :

1 Positionner la ceinture de façon à ce que son baleinage dorsal soit centré de part et d'autre de la colonne vertébrale, l'étiquette d'identification de la ceinture devant se trouver en haut de la ceinture.

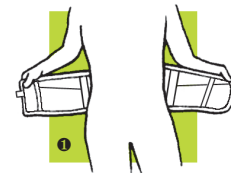

2 Enrouler la ceinture autour de la taille en positionnant la partie velours extérieure sur le ventre, puis y apposer la partie auto-agrippante pour maintenir le tout.



3 Renforcer le maintien dorsal en ajustant les pattes de serrage latérales.



4 Serrer en fonction de la contention souhaitée.



Pour tous conseils, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Marque Verte - Vente exclusive en pharmacie  
Distribué par SEMES S.A. - B.P. 103 - 54183 HEILLECOURT

