

## Ceinture de soutien lombaire classique

### INDICATIONS :

- Lumbalgie
- Arthrose lombaire
- Lumbago
- Douleurs musculaires

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas mettre la ceinture sur une peau lésée.

### PROPRIÉTÉS :

La ceinture de soutien lombaire flexi **CAST**° de Marque Verte est fabriquée à partir de tissu élastique résistant et souple, assurant ainsi un parfait maintien avec un confort maximum. Ses 4 baleines cambrées en acier contribuent efficacement au renfort lombaire et ses 2 baleines souples assurent un renfort abdominal. La ceinture de soutien lombaire flexi **CAST**° se règle facilement par un système auto-agrippant.

### PRÉSENTATION :

Hauteur	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Taille	T1	T2	T3	T4
Tour de taille	Inférieur à 90 cm	De 90 à 110 cm	De 110 à 125 cm	De 125 à 140 cm
Code ACL	431 506 0	431 507 7	431 508 3	796 557 4

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne mettez jamais votre ceinture en contact avec une pommade ou un détachant. Ne l'exposez jamais près d'une source de chaleur ou aux rayons solaires.

### ENTRETIEN :

Laver la ceinture à l'eau douce (30°C) à la main avec un savon très pur. Ne pas employer de lessive contenant des détergents puissants. Rincer à l'eau douce. Laisser égoutter et sécher à plat.


Remboursé Sécurité Sociale  
Conforme LPPR



## Ceinture de soutien lombaire classique

### MODE D'EMPLOI :


1 Positionner la ceinture de façon à ce que son baleinage dorsal soit centré de part et d'autre de la colonne vertébrale, l'étiquette d'identification de la ceinture devant se trouver en haut de la ceinture.

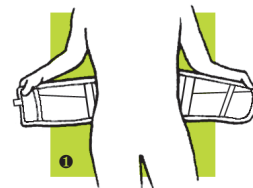

2 Enrouler la ceinture autour de la taille en positionnant la partie velours extérieure sur le ventre, puis y apposer la partie auto-agrippante pour maintenir le tout.



3 Serrer en fonction de la contention souhaitée.

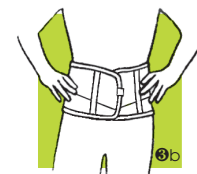

Pour tous conseils,  
consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Marque Verte - Vente exclusive en pharmacie  
Distribué par SEMES S.A. - B.P. 103 - 54183 HEILLECOURT

