

## Ceinture de soutien lombaire à rappel postural croisé

### INDICATIONS :

- Lombalgie
- Arthrose lombaire
- Lumbago
- Douleurs musculaires

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas mettre la ceinture sur une peau lésée.

### PROPRIÉTÉS :

La ceinture de soutien lombaire flexi **CAST**<sup>o</sup> de Marque Verte est fabriquée à partir de tissu élastique aéré résistant et souple. Le croisement des bandes de tissu est conçu pour épouser parfaitement l'anatomie musculaire, assurant ainsi un parfait maintien avec un confort maximum. Ses 4 baleines cambrées en acier contribuent efficacement au renfort lombaire et ses 2 baleines souples assurent un renfort abdominal. La ceinture de soutien lombaire flexi **CAST**<sup>o</sup> se règle facilement par un système auto-agrippant.

### PRÉSENTATION :

|                |                   |               |                |                 |                 |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Hauteur        | 26 cm             | 26 cm         | 26 cm          | 26 cm           | 26 cm           |
| Taille         | T1                | T2            | T3             | T4              | T5              |
| Tour de taille | Inférieur à 85 cm | De 85 à 95 cm | De 95 à 105 cm | De 105 à 120 cm | De 120 à 140 cm |
| Code ACL blanc | 763 615 5         | 763 616 1     | 763 617 8      | 772 646 7       | 430 900 7       |
| Code ACL noir  | 763 612 6         | 763 613 2     | 763 614 9      | 772 647 3       | 430 901 3       |

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne mettez jamais votre ceinture en contact avec une pommade ou un détachant. Ne l'exposez jamais près d'une source de chaleur ou aux rayons solaires.

### ENTRETIEN :

Laver la ceinture à l'eau douce (30°C) à la main avec un savon très pur. Ne pas employer de lessive contenant des détergents puissants. Rincer à l'eau douce. Laisser égoutter et sécher à plat.


Remboursé Sécurité Sociale  
Conforme LPPR



## Ceinture de soutien lombaire à rappel postural croisé

### MODE D'EMPLOI :


- 1 Positionner la ceinture de façon à ce que son baleinage dorsal soit centré de part et d'autre de la colonne vertébrale, l'étiquette d'identification de la ceinture devant se trouver en haut de la ceinture.

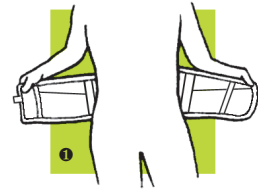

- 2 Enrouler la ceinture autour de la taille en positionnant la partie velours extérieure sur le ventre, puis y apposer la partie auto-agrippante pour maintenir le tout.



- 3 Serrer en fonction de la contention souhaitée.

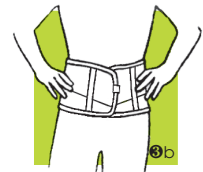

Pour tous conseils,  
consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Marque Verte - Vente exclusive en pharmacie  
Distribué par SEMES S.A. - B.P 103 - 54183 HEILLECOURT

