

Collier cervical C3

INDICATIONS :

- Maintien renforcé en hyperextension en cas d'entorses cervicales bénignes
- Névralgies cervico-brachiales
- Traumatismes cervicaux.

PROPRIÉTÉS :

Le collier cervical C3 est indiqué pour le maintien renforcé en hyperextension en cas d'entorses cervicales bénignes, névralgies cervico-brachiales et traumatismes cervicaux. Sa structure en polyéthylène avec perforations permet une ventilation naturelle. Réglable en hauteur, le système autoagrippant assure un bon confort grâce à un rembourrage de bord, recouvert de simili-cuir.

PRÉSENTATION :

Taille	Tour de cou	Code ACL
T1	35-39 cm	432 258 0
T2	39-43 cm	432 259 7
T3	43-48 cm	432 260 5
T4	48-53 cm	432 261 1
T5	53-58 cm	432 262 8

*Circonférence du cou à mi-hauteur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - CONTRE INDICATIONS :

Traumatisme cervical grave. En cas de port prolongé ou d'inconfort, suivre les conseils médicaux.

ENTRETIEN :

Laver à la main avec un savon doux et essuyer avec un linge propre.
Ne pas utiliser de produits alcoolisés.


Collier cervical C3

MISE EN PLACE :

Mesurer le tour de cou pour obtenir la taille exacte. Le réglage de la hauteur se fait par la fixation autoagrippante. La hauteur est réglable de 8 à 12 cm. Le réglage doit permettre une vision horizontale.

Lors de la première mise en place il est nécessaire qu'un professionnel s'assure de la bonne adaptation du collier et d'une compréhension correcte de la technique de pose.

- 1 Ouvrir le collier, positionner le menton au niveau de la découpe anatomique.
- 2 Ajuster la fermeture auto-agrippante en fonction du tour du cou.
- 3 Une fois le collier bien ajusté, aucun mouvement de rotation, ni de flexion ne doit être possible.

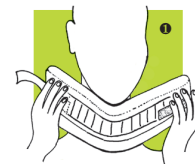

Pour tous conseils,
consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Marque Verte - Vente exclusive en pharmacie
Semes S.A. - B.P. 103 - 54183 HEILLECOURT

