



Spray d'eau de mer hypertonique

MODE D'EMPLOI

Peut être utilisé dans toutes les positions.

Introduire délicatement l'embout dans une narine et exercer une brève pression, attendre quelques instants puis moucher. Procéder de la même façon pour l'autre narine. Pour le nourrisson, il est conseillé de le laisser allongé, la tête inclinée sur le côté.

Ne jamais effectuer un lavage de nez quand la tête de l'enfant est en arrière afin d'éviter que le liquide ne descende dans la gorge.

COMPOSITION

Eau de mer : 100 %.

CO₂ qsp pH physiologique.

Salinité totale : 35 ‰ environ

e 100 ml **175**

ENVIRON 300 DOSES

Récipient sous pression, à protéger contre les rayons solaires.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer
ou brûler même après usage (Gaz propulseur inerte : azote).

MARQUE VERTE - Vente exclusive en pharmacie

Distribuée par : SEMES S.A.

B.P. 70103 - 54183 HEILLECOURT - FRANCE



Softmer

11 ter, rue Casenave

94430 Chennevière sur Marne

Made in France



0459


Formulé sous contrôle d'un laboratoire pharmaceutique.

**Les produits Marque Verte, conçus par des pharmaciens,
ont subi de nombreux tests lors de leur mise au point
et font l'objet de contrôles rigoureux sur chaque lot de fabrication.**

Spray d'eau de mer hypertonique

- Nez bouché
- Microdiffusion respectant les muqueuses nasales
- pH physiologique

Efficace dans toutes les positions

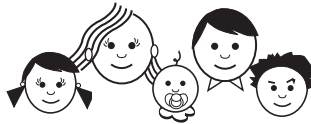


Nourrisson de plus de 6 mois, enfant, adulte

INDICATIONS

Le spray d'eau de mer hypertonique Marque Verte permet de décongestionner les fosses nasales grâce à sa composition 100% eau de mer. Il est recommandé pour le traitement d'appoint des pathologies rhinosinusales avec nez bouché.

1 à 3 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.

1. Enlever verticalement le capot protecteur.
2. Introduire délicatement l'embout nasal à l'entrée de la narine.
3. Exercer une brève pression sur l'embout.
4. Laisser s'écouler l'excédent de solution qui doit entraîner les mucosités, puis moucher.
5. Nettoyer l'embout à l'eau savonneuse, rincer et essuyer.
6. Ne pas stériliser l'embout dans un four micro-ondes.

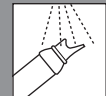

PROPRIÉTÉS



L'eau de mer Marque Verte se compose de 100% d'eau de mer, ce qui lui confère des propriétés décongestionnantes des fosses nasales. L'adjonction de gaz carbonique permet de rapprocher le pH de celui des muqueuses nasales et d'utiliser de l'eau de mer pure, non modifiée.